

DRIVER・WALKER
CHECK&TRAINER

運転・歩行能力診断

点灯くん

ミニタイプ




光を追って 遊びゴコロでトライする能力診断 子どもから高齢者まで 「楽しいね」が答えです



簡単な検査で幅広い年齢に対応します

もぐらたたきの要領で、点灯する光を追ってランプを押すだけの簡単な検査から、複数のランプに反応したり、判断をして反応したり、難易度の高い検査までが可能です。

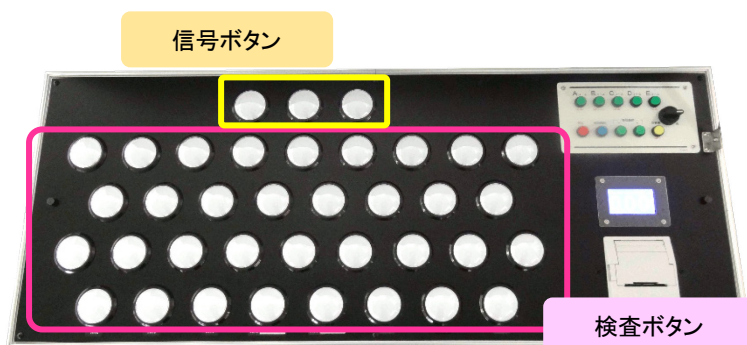

34個の検査ボタンと、3個の信号ボタン
で様々なレベルの検査に対応します。



短い時間で検査ができます

検査時間も短く、イベント時など大勢の方に体験していただけます。

コンパクト設計で持ち運びが簡単です

従来の「点灯くん」から検査ボタンの数を減らさず、
できる限りコンパクト設計にしました。

幅:1,120 mm 高さ:470 mm 厚み:175 mm
重量:約 19 kg





18種類

の豊富な検査内容

交通場面に必要な「認知・判断・動作」

瞬間記憶検査により、見えにくい箇所が診断できます

検査名	検査内容	検査名	検査内容
1.単純反応	認知	10.複数選択記憶マッチング反応	認知・判断・記憶・動作
2.単純マッチング反応	認知・動作	11.遂行回数	動作の素早さ(手元)
3.複数単純マッチング反応	認知・動作	12.遂行回数	動作の素早さ
4.選択反応	認知・判断	13.遂行回数	動作の素早さ(複数)
5.選択マッチング反応	認知・判断・動作	14.判断+遂行回数	判断力+動作の素早さ(手元)
6.複数選択マッチング反応	認知・判断・動作	15.判断+遂行回数	判断力+動作の素早さ
7.単純記憶マッチング反応	認知・記憶・動作	16.判断+遂行回数	判断力+動作の素早さ(複数)
8.複数記憶マッチング反応	認知・記憶・動作	17.タイミング検査	
9.選択記憶マッチング反応	認知・判断・記憶・動作	18.ワーキングメモリー検査	

各検査を組み合わせた A~E の5種類のコース設定もご用意しております。
対象者にあわせてご利用いただけます。



詳細な結果票がプリントアウトされます

今日の結果票

この結果票は、あなたの運転や歩行に必要な基本（認知、判断、記憶、動作）をチェックしています。

結果番号：0001 回数：15回
速度：中速 コース：A (1,2,5,7)
年齢：70代

◆ P 1 (認知)
平均反応時間：
0.45秒 評価：1 **2** 3 4 5
(左0.36 中0.41 右0.56)

平均正答率：**100%**
(左100 中100 右100)

◆ P 2 (認知+動作)
平均反応時間：
0.85秒 評価：1 **2** 3 4 5
(左0.82 中0.88 右0.81)

平均正答率：**100%**
(左100 中100 右100)

◆ P 5 (認知+判断+動作)
平均反応時間：
1.20秒 評価：1 **2** 3 4 5
(左1.17 中1.23 右1.22)

平均正答率：**80%**
(左100 中100 右100)

◆ P 7 (認知+記憶+動作)
平均反応時間：
0.35秒 評価：1 2 3 **4** 5
(左0.42 中0.33 右0.41)

平均正答率：**86%**
(左 50 中100 右100)

検査終了後、自動的に結果票がプリントアウトされ、各検査の


- ・平均反応時間(5段階評価)
- ・正答率

が表示されます。

認知・判断・動作についてそれぞれ比較できる

例)：難しい判断が入ると反応に時間を要する。

間違いも起こしやすい

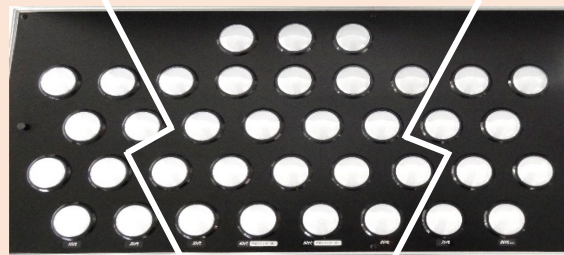

左エリア

中央エリア

右エリア

左・中央・右 とエリアごとの結果も表示されるので、見えにくかった箇所、反応が遅れている箇所なども理解できます。



機種名	運転・歩行能力診断「点灯くん」ミニタイプ
型番	20M-DCTM
外形寸法	<収納時> 幅:1,120 mm / 奥行:470 mm / 高さ:175 mm <使用時> 幅:1,120 mm / 奥行:610 mm / 高さ:565 mm
重量	約 19 kg
使用電源	AC100V ・ 50/60Hz
消費電力	62W (最大)
動作環境	温度 5℃～40℃ / 湿度 20%～80% (結露しないこと)
プリンタ印字方式	サーマルラインドット方式
プリンタ用紙	紙幅:58 mm 外径:φ60 mm以下 (推奨品 P-58-30 / STH-215)

仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください